



1. Geh vor der Benutzung noch mal pinkeln.  
HyStool-Beutel sind zu 100% wasserlöslich und können sich auflösen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.



2. HyStool-Beutel werden auf den Toilettensitz geklebt. Der Sitz muss trocken sein.

Wenn der Sitz feucht ist, haften die Aufkleber möglicherweise nicht richtig. Trockne den Sitz bei Bedarf, bevor du den Beutel benutzt.



3. Der HyStool-Beutel ist gefaltet in einer Packung.

Nimm ihn heraus und falte ihn vollständig auf, bevor du ihn auf den Toilettensitz legst.




4. Zieh die Folie von den zwei Aufklebern am breiten Ende des Beutels ab und klebe sie hinten auf den Toilettensitz.

Die gefalteten Seiten des Beutels liegen an den Seiten des Sitzes.



5. Zieh die Folie von den letzten zwei Aufklebern ab, zieh den Beutel nach vorn und klebe ihn wie gezeigt auf den Sitz.

Lass vorne eine kleine Lücke, damit versehentlich Urin nicht in den Beutel gelangt.

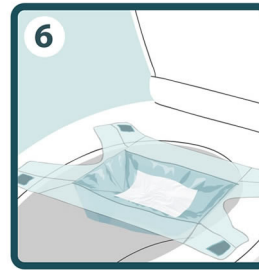


6. Lege etwas Toilettenpapier auf den Boden des Beutels.

So wird verhindert, dass nasser Stuhl den Beutel berührt, da er sich bei Kontakt mit Wasser auflösen kann.



7. Benutze die Toilette wie gewohnt.

Nach dem Stuhlgang entnimm die Stuhlprobe so schnell wie möglich aus dem HyStool-Beutel.

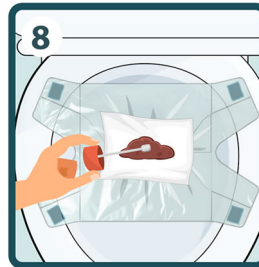

8. Entnimm eine Stuhlprobe aus dem HyStool-Beutel mit dem Probenbehälter.



9. Zieh die Aufkleber vom Toilettensitz ab und lass den Beutel samt Inhalt ins Toilettenwasser fallen. Einfach runterspülen. HyStool-Beutel sind zu 100% wasserlöslich.



10. Wenn der Beutel beim ersten Spülen nicht heruntergespült wird, spüle erneut. Rückstände in der Schüssel können abgebürstet werden. Klebereste auf dem Sitz kannst du mit einem feuchten Tuch abwischen.