



1. Va faire pipi avant de l'utiliser.

Les sacs HyStool sont 100% solubles dans l'eau et peuvent se dissoudre au contact de l'eau.



2. Les sacs HyStool se fixent sur la lunette des toilettes. La lunette doit être sèche.

Si elle est humide, les autocollants peuvent ne pas bien coller. Si besoin, sèche la lunette avant d'utiliser le sac.



3. Le sac HyStool est plié dans un emballage.

Sors-le et déplie-le complètement avant de le placer sur la lunette des toilettes.




4. Retire la protection des deux autocollants à l'extrémité large du sac et colle-les à l'arrière de la lunette des toilettes.

Les côtés pliés du sac doivent se placer de chaque côté de la lunette.



5. Retire la protection des deux derniers autocollants, tire le sac vers l'avant et colle-le sur la lunette comme indiqué.

Laisse un petit espace à l'avant pour éviter que de l'urine ne tombe dans le sac par erreur.

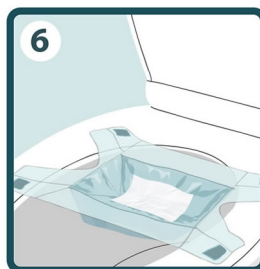


6. Mets un peu de papier toilette au fond du sac.

Cela évite que des selles mouillées touchent le sac, car il peut se dissoudre au contact de l'eau.



7. Utilise les toilettes normalement.

Après la selle, prélève l'échantillon de selles dans le sac HyStool dès que possible.

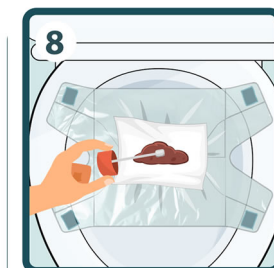

8. Prélève un échantillon de selles dans le sac HyStool à l'aide du dispositif de collecte.



9. Retire les autocollants de la lunette et laisse tomber le sac et son contenu dans l'eau des toilettes.

Il suffit de tirer la chasse. Les sacs HyStool sont 100% solubles dans l'eau.



10. Si le sac ne part pas au premier essai, tire la chasse une seconde fois. Les résidus dans la cuvette peuvent être brossés.

S'il reste des traces de colle sur la lunette, essuie-les avec un chiffon humide.