



1. Vai in bagno a fare pipì prima dell'uso.

I sacchetti HyStool sono 100% solubili in acqua e possono sciogliersi se toccano l'acqua.



2

2. I sacchetti HyStool si fissano alla tavoletta del water. La superficie deve essere asciutta.

Se è umida, gli adesivi potrebbero non attaccarsi bene. Se necessario, asciuga la tavoletta prima di applicare il sacchetto.



3

3. Il sacchetto HyStool è piegato all'interno della confezione.

Toglilo e aprilo completamente prima di fissarlo alla tavoletta del water.



4

4. Rimuovi la pellicola dai due adesivi sul lato largo del sacchetto e fissali sul retro della tavoletta.


I lati piegati del sacchetto devono trovarsi ai lati della tavoletta.



5

5. Rimuovi la pellicola dagli ultimi due adesivi, tira il sacchetto in avanti e fissalo alla tavoletta come mostrato.

Lascia un piccolo spazio davanti per evitare che l'urina accidentale finisca nel sacchetto.

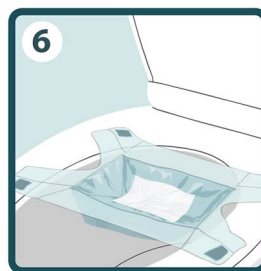

6

6. Metti un po' di carta igienica sul fondo del sacchetto.

Aiuta a evitare che le feci umide tocchino il sacchetto, che può sciogliersi a contatto con l'acqua.



7

7. Usa il water normalmente.

Dopo l'evacuazione, raccogli il campione il prima possibile dal sacchetto HyStool.



8

8. Raccogli un campione di feci dal sacchetto HyStool usando il dispositivo di raccolta.



9

9. Rimuovi gli adesivi dalla tavoletta e lascia cadere il sacchetto con il contenuto nell'acqua.

Basta tirare lo sciacquone. I sacchetti HyStool sono 100% solubili in acqua.



10

10. Se il sacchetto non si scarica al primo tentativo, tira di nuovo lo sciacquone.

Eventuali residui nel WC possono essere rimossi con la spazzola. Se rimane della colla sul sedile, puliscila con un panno umido.