



1

1. Ve al baño a orinar antes de usarlo.

Las bolsas HyStool son 100 % solubles en agua y pueden disolverse si entran en contacto con agua.



2

2. Las bolsas HyStool se colocan en el asiento del inodoro. El asiento debe estar seco.


Si está húmedo, los adhesivos pueden no pegarse bien. Si es necesario, seca el asiento antes de usar la bolsa.



3

3. La bolsa HyStool viene doblada dentro de un paquete.

Sácala y ábrela completamente antes de colocarla sobre el asiento del inodoro.

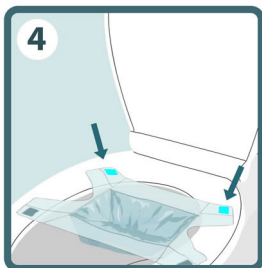

4

4. Retira el papel protector de los dos adhesivos en el lado ancho de la bolsa y pégalos en la parte trasera del asiento.

Los lados doblados de la bolsa deben quedar a los lados del asiento.



5

5. Retira el papel de los otros dos adhesivos, estira la bolsa hacia adelante y pégala al asiento como se indica.

Deja un pequeño espacio en la parte delantera para evitar que la orina accidental caiga dentro de la bolsa.



6

6. Coloca un poco de papel higiénico en el fondo de la bolsa.

Esto ayuda a evitar que las heces húmedas toquen la bolsa, ya que puede disolverse al mojarse.



7

7. Usa el inodoro con normalidad.

Después de defecar, recoge la muestra lo antes posible de la bolsa HyStool.



8

8. Recoge una muestra de heces de la bolsa HyStool usando el dispositivo de recogida.



9

9. Retira los adhesivos del asiento del inodoro y deja que la bolsa con su contenido caiga al agua.

Simplemente tira de la cadena. Las bolsas HyStool son 100 % solubles en agua.



10

10. Si la bolsa no se va al primer intento, tira de la cadena otra vez.

Cualquier residuo en la taza puede eliminarse con el cepillo. Si quedan restos de adhesivo en el asiento, límpialos con un paño húmedo.