



1

1. Ga plassen voordat je het gebruikt.

HyStool-zakjes zijn 100% oplosbaar in water en kunnen oplossen bij contact met water.



2

2. HyStool-zakjes worden aan de toiletbril bevestigd. De bril moet droog zijn.


Als de bril vochtig is, kunnen de stickers niet goed blijven zitten. Droog de bril indien nodig voordat je het zakje gebruikt.



3

3. Het HyStool-zakje zit opgevouwen in een verpakking.

Haal het eruit en vouw het helemaal open voordat je het op de toiletbril plaatst.

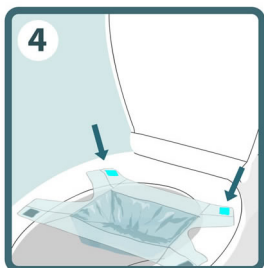

4

4. Verwijder het papier van de twee stickers aan de brede kant van het zakje en plak ze achter op de toiletbril.


De gevouwen zijden van het zakje komen langs de zijkanten van de bril.



5

5. Verwijder het papier van de laatste twee stickers, trek het zakje naar voren en plak het op de bril zoals aangegeven..

Laat vooraan een kleine opening, zodat eventueel urine niet in het zakje komt.

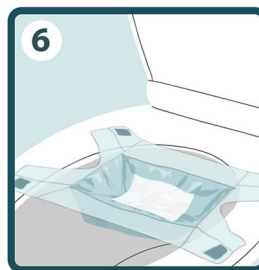

6

6. Leg wat toiletpapier op de bodem van het zakje.


Dat voorkomt dat natte ontlasting het zakje raakt, omdat het kan oplossen bij contact met water.



7

7. Gebruik het toilet zoals gewoonlijk.

Na de stoelgang neem je zo snel mogelijk het monster uit het HyStool-zakje.

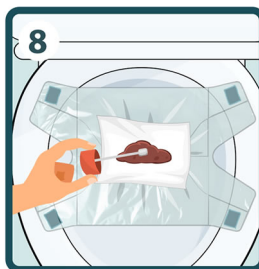

8

8. Neem een ontlastingsmonster uit het HyStool-zakje met het bijgeleverde hulpmiddel.



9

9. Trek de stickers van de toiletbril en laat het zakje met inhoud in het water vallen.

Gewoon doorspoelen. HyStool-zakjes zijn 100% wateroplosbaar.



10

10. Als het zakje niet in één keer doorspoelt, spoel dan opnieuw.

Eventuele resten in de pot kunnen met een borstel worden verwijderd. Stickerresten op de bril veeg je weg met een vochtige doek.