



1

1. Lad vandet, før du bruger posen.

HyStool-posen er 100 % vandopløselige og kan opløses ved kontakt med vand.



2

2. HyStool-posen fastgøres på toiletsædet. Sædet skal være helt tørt.

Hvis det er fugtigt, kan klistermærkerne have svært ved at hæfte. Tør sædet om nødvendigt før brug.



3

3. HyStool-posen leveres foldet i pakken.

Tag den ud, fold den helt ud og åbn den fuldt, før du monterer den på toiletsædet.



4

4. Fjern beskyttelsespapiret fra de to klistermærker på den brede kant af posen, og fastgør dem bag på toiletsædet.


De foldede sider af posen skal placeres langs siderne af sædet.



5

5. Fjern beskyttelsespapiret fra de resterende to klistermærker, træk posen frem og fastgør den som vist.

Lad en åbning være foran, så eventuel urin ikke rammer posen.

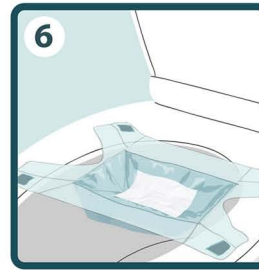

6

6. Læg lidt toiletpapir i bunden af posen.


Papiret hjælper med at forhindre, at våd afføring kommer i direkte kontakt med posen, da den kan opløses ved kontakt med vand.



7

7. Brug toilettet som normalt.

Efter afføring skal du indsamle prøven fra HyStool-posen så hurtigt som muligt.

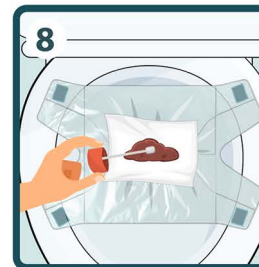

8

8. Indsamle afføringsprøven fra HyStool-posen ved hjælp af et egnet prøvetagningsudstyr.



9

9. Fjern klistermærkerne fra toiletsædet, og lad posen med indhold falde ned i vandet.

Skyl ud. HyStool-posen er 100 % vandopløselige.



10

10. Hvis posen ikke skylles helt væk første gang, så skyl igen. ☒

Eventuelle rester kan fjernes med en toiletbørste.

Hvis der er klisterrester på sædet, tørres de af med en fugtig klud.