



1. Oddaj mocz przed użyciem.

Worki HyStool są w 100% rozpuszczalne w wodzie i mogą się rozpuścić w kontakcie z wodą.



2. Worki HyStool mocuje się do deski sedesowej. Deska musi być całkowicie sucha..

Jeśli jest wilgotna, naklejki mogą się nie przykleić prawidłowo. W razie potrzeby osusz deskę przed użyciem.



3. Worek HyStool jest złożony w opakowaniu.

Wyjmij go, rozłóż i całkowicie otwórz przed przymocowaniem do deski sedesowej.




4. Zdejmij papier ochronny z dwóch naklejek na szerszym brzegu worka i przymocuj je do tylnej części deski sedesowej.

Złożone krawędzie worka powinny znajdować się po bokach deski.



5. Zdejmij papier ochronny z pozostałych dwóch naklejek, naciągnij worek do przodu i przymocuj do deski zgodnie z ilustracją.

Zostaw niewielką szczelinę z przodu, aby przypadkowy wyciek moczu nie dostał się do worka.

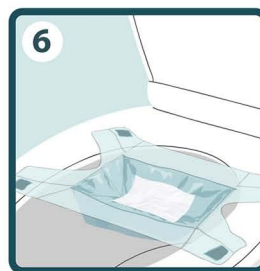

6. Umieść trochę papieru toaletowego na dnie worka.

Papier pomaga zapobiec kontaktowi wilgotnego stolca z workiem, ponieważ kontakt z wodą może spowodować jego rozpuszczenie.



7. Skorzystaj z toalety jak zwykle.

Po wypróżnieniu pobierz próbkę stolca z worka HyStool tak szybko, jak to możliwe.



8. Pobierz próbkę stolca z worka HyStool przy użyciu odpowiedniego pojemnika do pobierania próbek.



9. Odklej naklejki z deski sedesowej i pozwól, aby worek wraz z zawartością wpadł do wody.

Splucz toaletę. Worki HyStool są w 100% rozpuszczalne w wodzie.



10. Jeśli worek nie splucze się całkowicie za pierwszym razem, splucz ponownie.

Pozostałości w muszli można usunąć szczotką. Jeśli na desce pozostanie klej, wytrzyj go wilgotną ściereczką.